

ชุดออกซิเจนหายใจ MINI-O₂ รุ่น IVR-3L

AMERWAY
MEDICAL GAS EQUIPMENT

Portable Oxygen Set MINI-O₂ (IVR-3L)

เกรวาล์ว

1. หน้าปัด
2. ตัวปรับอัตราการไหล
3. หัวเติมก๊าซ CGA 540 และฝาปิด
4. ช่องจ่ายก๊าซแบบ DISS
5. หัวจ่ายก๊าซ
6. ที่จับ

Integrated Valve Regulator

- Pressure gauge
Flow Adjusting Dial
Flow Adjusting Dial
DISS Outlet
Gas Outlet
Handle

ส่วนประกอบ

- ถังบรรจุก๊าซอลูมิเนียมขนาด 3 ลิตร
- เกรวาล์ว
- สายหายใจรุ่นแยงจุมุก

วิธีใช้งาน

- เช็มนบนหน้าปัดจะแสดงระดับแรงดันในถัง
- หากพบมีการรั่วไหลให้ตรวจสอบการติดตั้งเกรวาล์วว่าแน่นหรือไม่
- ต่อสายหายใจเข้ากับหัวจ่ายก๊าซ
- เริ่มจ่ายก๊าซออกซิเจนโดยบิดที่ตัวปรับ flow ด้านบนของเกรวาล์ว โดยสามารถปรับความแรงของก๊าซได้ตั้งแต่ 0 - 25 ลิตร/นาที
- ปิดตัวปรับ flow ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้

Content

- 3-Liter Aluminum Cylinder
- Integrated regulators
- Breathing Cannula

Usage Instruction

- The Pressure Gauge will display cylinder's oxygen pressure.
- If leaking sound is heard, close the valve immediately and recheck if installation of Integrated valve regulator is tight.
- Connect breathing cannula into the Gas Outlet.
- Adjust the Flow Adjust Dial to obtain oxygen. Oxygen flow can be adjusted from 0-25 liter/minute.
- Turn off the Flow Adjust Dial after use.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดถัง	ปริมาณลิตรน้ำ	แรงดันเต็มถัง (PSI)	อัตราการไหล ลิตร/นาที	ระยะเวลาการใช้งาน (ชั่วโมง)*
0.5 คิว	3.4	2000	3	2.5

*ที่อัตราการไหล 3 ลิตร/นาที

